

## 01 Start Trainings Modus



Bildschirm aktivieren



Benutzer auswählen



PIN eingeben



Menüpunkt "Training" wählen



## 02 Training auswählen und starten



Trainingsprogramm auswählen




Wähle Zahl zwischen 1 und 10



Programm starten



### 03 Während des Trainings

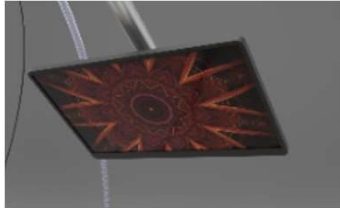

Es gibt nichts zu tun,  
relax and enjoy



**i** Mit "Abbrechen" können Sie jederzeit das Training beenden



**i** Der Control Monitor Zeigt die aktuelle Stimulation sowie einige Biowerte. Diese müssen nicht beachtet werden und stehen auch nach dem Training zur Ansicht zur Verfügung.

### 04 Training beenden



Um das Training zu übermitteln bitte die Fragen beantworten

Sind Sie während dem Training eingeschlafen?

Ja  Nein  Weiß es nicht genau

Did you fall asleep while training (yes / no / not sure)

Wie haben Sie sich während des Trainingsprogramms gefühlt?




How did you feel during training (1-10)?

Wie fühlen Sie sich jetzt?



How do you feel now (1-10)?

Wähle "Training Abschließen" um das Training zu übertragen 



Wähle nun "Standby" unten rechts um dich auszuloggen



## Quickstart Wlan Einrichtung

### 01 Wlan suchen



Bildschirm aktivieren



In der Leiste den zweiten Button wählen



WLAN-Einrichtung starten



Abbrechen

Wähle WLAN Einrichtung starten

### 02 Wlan auswählen



Netzwerk auswählen



Passwort eingeben  
Login wählen



## Weitere Funktionen



**NBG-Atemtest**

Selbst- oder kontrollierter Luftdruck über die Brust über die Brustkassette, und selbst über 1 Atemnachfrage über 10 Sekunden

Bisherige Atemtest	
Datum	Kapazität (L)
20.05.2020 07:07	20.0 L
22.05.2020 08:06	0.0 L
22.05.2020 08:06	0.0 L

Eintrag 1 von 3 Einträgen | 10 | 10

### NBG-Atemtest

Ermöglicht das Erfassen der Atemkapazität durch einen Luftanhaltetest



**Nachrichten**

Name	Datum
<b>Martin Rusam</b> SUPER!!! Heute wieder einmal, meine Freunde (ist Martin und ich) betreue Dich und dann NeuroBodyGym - Gerät, ich danke Oliver hat die Technik an sich. Dabei werden wieder NeuroBodyGym Training, waren sehr gut. Es wird jetzt noch eine Diagnosekassette bestellt und dann werde ich auf Training ansetzen. Ich wart...	27.10.2020 08:48 (10)

Eintrag 1 von 1 Einträgen | 10 | 10

### Nachrichten

Persönliche Mitteilungen und Informationen



### Standby

Schaltet den Monitor aus und ermöglicht dem Gerät Hintergrundaktualisierungen (empfohlene Option nach dem Training)






### Live Sessions und Trainer Modus




Verfügbar nur nach Absprache mit NeuroBodyTech Personal

## Erklärung Statusleiste








-  System ausschalten < Führt das Gerät herunter
-  System neustarten < Startet das Gerät neu
-  Abbrechen






-  Hypoxikator online < Verbindungsstatus O2 Gerät
- LED im Standby: deaktiviert < Lichteinstellungen O2 Gerät
- LED während dem Training: aktiviert
-  Verbindung neu aufbauen < Verbindung bei Fehler neu aufbauen
-  Abbrechen



-  Verbunden mit: M 42 R < Zeigt das verbundene Netz
-  WLAN-Qualität: 46% < Anzeige der Wlan Empfangsstärke
-  Verbindungsgeschwindigkeit: sehr gut < Internetgeschwindigkeit
-  WLAN-Einrichtung starten < Startet den Wlan Assistenten
-  Abbrechen



- Alle Trainingsdaten synchronisiert < Status Trainingsupdates
-  Nach Updates suchen (zuletzt vor ein paar Sekunden) < Manuelle Updates suchen
-  Abbrechen

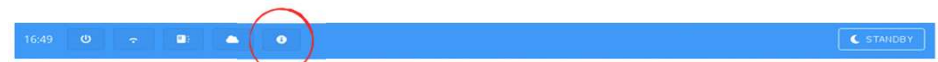

© 2020 NeuroBodyTech GmbH  
 Für Fragen und Hilfe: +49 86 24 / 89 17 69 - 0  
 support@neurobodygym.com  
 Geräte-ID: 9a88f

Geräte-ID und Softwareversionen