

01 Start training mode



Activate screen



Select user



Enter PIN



Select the menu item "Training"



02 Select training session and begin



Select training program



How do you feel? Select a number between 1 - 10




Start program



Training started

03 During the training session

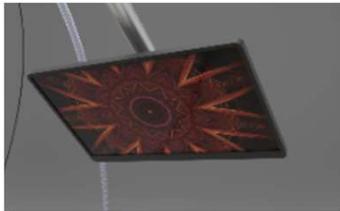

There is nothing to do. Just relax and enjoy your session.




i Select "Abbrechen" to end your training session any time



i The control monitor displays the current simulation as well as some of your vitals. You don't have to pay attention to them now, as they will be available for inspection after your training session.

04 Terminate training session

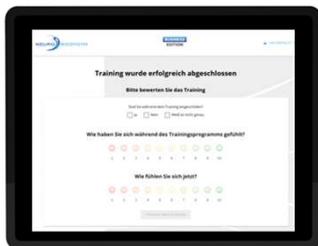

In order to submit the training session please answer the following questions:

Sind Sie während dem Training eingeschlafen?
 Ja Nein Weiß es nicht genau


Did you fall asleep during the training session (yes / no / not sure)?

Wie haben Sie sich während des Trainingsprogramms gefühlt?




How did you feel during the training session (1-10)?

Wie fühlen Sie sich jetzt?

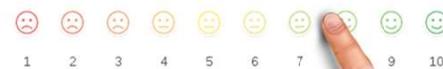

How do you feel now (1-10)?

Select "Training Abschließen" to submit your training session.

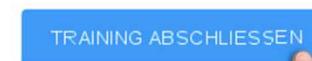

Now, select "Standby" on the bottom right to log out.



Quickstart Wi-Fi setup


01 Search Wi-Fi Network



Activate screen



Select the second button from the bar

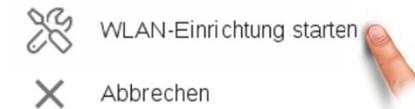

Select "WLAN Einrichtung starten" (to start Wi-Fi setup)

02 Select Wi-Fi network



Select network



Please enter your password and select login



Wi-Fi setup successful

Status bar explanation



-  System ausschalten < Shuts down the device
-  System neustarten < Restarts the device
-  Abbrechen < Cancel



-  Hypoxikator online < Connection status of O2 device
-  LED im Standby: deaktiviert < Lighting setup of O2 device
- LED während dem Training: aktiviert
-  Verbindung neu aufbauen < Reconnect after error
-  Abbrechen < Cancel



-  Verbunden mit: M 42 R < Shows the connected Wi-Fi
-  WLAN-Qualität: 46% < Shows Wi-Fi signal strength
-  Verbindungsgeschwindigkeit: sehr gut < Internet speed
-  WLAN-Einrichtung starten < Starts Wi-Fi assistant
-  Abbrechen < Cancel



- Alle Trainingsdaten synchronisiert < Status of training updates
-  Nach Updates suchen (zuletzt vor ein paar Sekunden) < Enables manual searching for updates
-  Abbrechen < Cancel



© 2020 NeuroBodyTech GmbH
 Für Fragen und Hilfe: +49 86 24 / 89 17 69 - 0
 support@neurobodygym.com
 Geräte-ID: 9a88f

Device-ID and software version