

01 Empezar trainings modus



Activar la pantalla



Seleccionar usuario



Ingresar PIN



Seleccionar "Training" en el elemento del menú



02 Seleccionar y empezar a entrenar



Seleccionar programa de entrenar



Cómo se siente? Selecciona un número entre 1 y 10




Iniciar programa



El entrenamiento empieza

03 Durante la sesión de entrenamiento

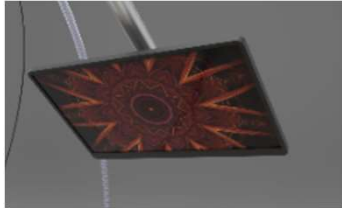

No hay nada que hacer, solo relajáte y disfruta de tu sesión



i Seleccione "Abbrechen" para finalizar su sesión en cualquier momento.



i El monitor del control muestra la simulación actual, así como algunos de sus signos vitales. No tiene que prestarles atención ahora, ya que estarán disponibles para su inspección después de su sesión de entrenamiento.

04 Después de la sesión de entrenamiento



Para enviar la sesión de entrenamiento responda las siguientes preguntas.

Sind Sie während dem Training eingeschlafen?

Ja Nein Weiß es nicht genau

Se quedó dormido cuando entrenaba? (Si/No / No estoy)

Wie haben Sie sich während des Trainingsprogramms gefühlt?



Cómo se sintió durante la sesión de entrenamiento?

Wie fühlen Sie sich jetzt?



Cómo se siente ahora? (1-10)

Seleccione "Training abschliessen" para enviar su sesión de entrenamiento



Ahora, seleccione "Standby" en la parte inferior derecha para cerrar sesión



Versión de inicio rápido


01 Encontrar una red Wi-Fi



Activar la pantalla



Seleccione el segundo botón

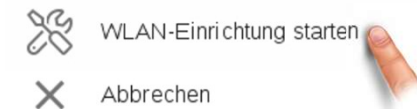

Seleccione "WLAN Einrichtung starten" (para iniciar la configuración de Wi-Fi)


02 Wlan auswählen



Seleccione la red



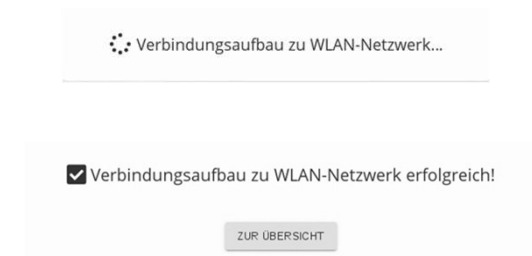


Ingrese su contraseña y seleccione iniciar sesión






Éxito

Explicación de la barra de estado






-  System ausschalten < Apaga el dispositivo
-  System neustarten < Reinicia el dispositivo
-  Abbrechen < Anular





-  Hypoxikator online < Estado de conexión del dispositivo O2
- LED im Standby: deaktiviert < Configuración de iluminación del dispositivo O2
- LED während dem Training: aktiviert
-  Verbindung neu aufbauen < Reconectar después del error
-  Abbrechen < Anular

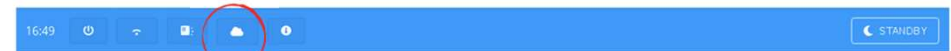

-  Verbunden mit: M 42 R < Muestra la conexión Wi-Fi
-  WLAN-Qualität: 46% < Muestra la intensidad de la señal de Wi-Fi
-  Verbindungsgeschwindigkeit: sehr gut < Velocidad de internet
-  WLAN-Einrichtung starten < Inicia asistente de Wi-Fi
-  Abbrechen < Anular



- Alle Trainingsdaten synchronisiert < Estado de las actualizaciones de formación
-  Nach Updates suchen (zuletzt vor ein paar Sekunden) < Habilita la búsqueda manual de actualizaciones
-  Abbrechen < Anular



© 2020 NeuroBodyTech GmbH
 Für Fragen und Hilfe: +49 86 24 / 89 17 69 - 0
 support@neurobodygym.com
 Geräte-ID: 9a88f

ID de dispositivo y versión de software